

1

## Aktivieren der Sitzbadewanne GK hera

Nach dem Aktivieren der **Sitzbadewanne GK hera** (Abb. 1) sehen Sie zwei beleuchtete LED auf der Tastatur. Eine dieser LED ist am Taster zur „Desinfektion“ (B) der andere am Taster „Türe öffnen“ (D) oder „Türe schließen“ (G). Öffnen Sie die seitliche Einstiegs-türe komplett. Die Person kann nun in die Wanne transferiert werden.



Abb. 1

2

## Schließen der Türe

Drücken Sie „Türe schließen“ (G) an der Tastatur und schließen Sie die Türe. Die Türe schließt nun auto-matisch. Wenn die Türe vollständig geschlossen ist, leuchtet die LED für „Türe schließen“ (G) ruhig.



Abb. 2

3

## Abfluss verschließen

Der Verschluss des Abflusses (N) befindet sich gegen-über der Einstiegs-türe. Durch Drehen des Handrades (Abb. 2) nach rechts wird der Verschlussstopfen geschlossen.

4

## Befüllen der Wanne

Drücken des Tasters „Wanneneinlauf“ (I). Eine rote LED leuchtet am Taster „Wanneneinlauf“ (I). Die Wanne füllt sich nun automatisch. Bei höchstmög-lichem Füllstand schaltet sich der Wanneneinlauf auto-matisch ab. Auch die rote LED leuchtet nicht mehr. Sie können den Wanneneinlauf jederzeit durch Drücken des Tasters „Wanneneinlauf“ (I) unter-brechen. Ein neuerliches Drücken aktiviert die Funktion wieder.



Abb. 3

5

## Einstellen der Wassertemperatur

Die Einstellung der Wassertemperatur erfolgt durch Drehen des Thermostadmischers (L) in der Mitte der Tastatur (Abb. 4). Die Zufluss- bzw. Brausetemperatur wird digital oberhalb des Drehknopfes angezeigt (M).

6

## Aktivierung der Hydromassage

Wenn der Wasserpegel den höchsten Füllstand erreicht hat, wird automatisch die Funktion der Hydromassage freigegeben. Die LED der Taste „Hydromassage“ (C) beginnt zu blinken. Durch Drücken der Taste setzen Sie die Hydromassage (O) in Betrieb. Die LED leuchtet.

7

## Einstellung der Massageintensität

Die Einstellung der Intensität der Massagedüsen erfolgt durch Drücken der „Plus“- (F) und „Minus“-Taste (E). Nach 10 Minuten schalten die Massage-düsen automatisch ab. Sie können jedoch durch Drücken der Taste „Hydromassage“ (C) den Massage-vorgang jederzeit unterbrechen.



Abb. 4

8

## Zugabe von Badeöl und Shampoo

Badeöl und Shampoo kann jederzeit aus der Spender-düse entnommen werden. Durch Drücken der jewei-ligen Taste „Badeöl“ (K) – „Shampoo“ (A) wird an der Unterseite des Wanneneinlaufes (P) das gewünschte Mittel dosiert abgegeben.



Abb. 5

## Benützung der Dusche

Zum Betätigen der Dusche (weiß) nehmen Sie die Selbstschluss-Brause aus Ihrer Halterung (Abb. 5). Durch Drücken der Taste „Brause“ (H) kann die Dusche jederzeit benützt werden. Der Wasserdurch-lauf wird jedoch erst durch Drücken des schwarzen Knopfes (R) direkt am Brausekopf gegeben.

## Wannenabfluss öffnen

Um den Wannenabfluss zu öffnen drehen Sie das Handrad (N) – wie unter Punkt 3 beschrieben – jedoch nach links.

## Wannentüre öffnen

Nach dem Entleeren der Wanne ist es möglich, durch Drücken der Taste „Türe öffnen“ (D) diese zu öffnen.

## Anwendung der Desinfektion

Nach dem Badevorgang leuchtet die LED der Taste „Desinfektion“ (B). Nehmen Sie nun die rote Brause (Abb. 6) aus Ihrer Halterung und drücken Sie die Taste „Desinfektion“ (B). Die LED wechselt nun die Farbe auf grün und es ist Ihnen nun möglich, durch Drücken des schwarzen Knopfes direkt am Brause-kopf die Wanne zu desinfizieren. Ein abermaliges Drücken der Taste „Desinfektion“ (B) stoppt den Desinfizierungs-vorgang. Eine blinkende LED bedeu-tet, kein Desinfektionsmittel vorhanden.

**Hinweis:** Während der Reinigung ist kein Wasserzulauf bzw. das Betätigen der Dusche möglich.

## Automatische Abschaltung

Falls die **Sitzbadewanne GK hera** einige Zeit lang nicht benutzt wird, schaltet die elektronische Strom-versorgung der Tastatur automatisch ab. In der Temperaturanzeige (M) erscheinen vier waagrechte Balken (---). Eine neuerliche Aktivierung erfolgt durch Drücken eines beliebigen Tasters.



Abb. 6

**Hinweis:** Bei Notfällen, bzw. wenn keine Zeit verbleibt das Abfließen des Badewassers bis zum Öffnen der Türe abzuwarten, wird durch Drücken eines Schalters die Türe (unabhängig vom Wasserpegel der Wanne) sofort geöffnet. Der Schalter befindet sich hinter der Tastatur. **Bitte nur in Extremfällen drücken!**

9

10

11

12

13

Bedienungsanleitung

hera

